

Sani-24[®]
GERMICIDAL SPRAY
Roche Germicidas

Powered By
MICROBAN

Use on hard, nonporous environmental surfaces.
Use for soft surface sanitization.

Uselas en superficies ambientales duras y no porosas.
Usos para desinfección de superficies suaves.



General Guidelines For Use

1. Hold grip section of bottle under spray nozzle. Turn nozzle to "ON" setting.



2. If present, remove heavy soil loads prior to disinfecting.



3. **To disinfect:** Spray 6-8 inches from surface. Using index finger, squeeze trigger to dispense liquid. Ensure even coverage and thorough wetness. Let stand for one (1) minute.



4. **For Continuously Active Disinfection (CAD) for 24 Hours:** Spray 6-8 inches from surface. Ensure even coverage and thorough wetness. Allow to air dry. Use of this product should not alter standard cleaning and disinfection practices. If surface treated with Sani-24[®] Spray is subsequently cleaned with anything other than Sani-24 Spray, Sani-24 Spray must be reapplied for Continuously Active Disinfection.



5. **For soft surface sanitization:** Hold container 6-8 inches from surface until thoroughly wet. Allow surface to remain visibly wet for 10 seconds. Let air dry.



Instrucciones Generales De Uso

1. Sostenga la sección de agarre de la botella debajo de la boquilla rociadora. Gire la boquilla hasta el ajuste "ON" (Abierta).

2. En caso de presencia de mucha suciedad, límpiela antes de desinfectar.

3. Para desinfectar: Rocíe una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie. Con el dedo índice, apriete el gatillo para dispensar el líquido. Asegúrese de cubrir de manera uniforme y mojar bien. Deje reposar el producto por un (1) minuto.

4. **No Para Desinfección activa continua (CAD*, por sus siglas en inglés) por 24 horas:** Rocíe una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie. Asegúrese de cubrir de manera uniforme y mojar bien. Deje secar al aire. El uso de este producto no debe modificar las prácticas estándar de limpieza y desinfección. Si, posteriormente, limpia la superficie tratada con Aerosol Sani-24 con cualquier otro producto que no sea el Aerosol Sani-24, deberá volver a aplicar este último para contar con Desinfección activa continua.

5. **Por desinfección de superficies suaves:** Sostenga el recipiente a entre 6 a 8 pulgadas de distancia de la superficie y rocíe hasta mojarla bien. Deje que la superficie permanezca visiblemente húmeda durante 10 segundos. Deje secar al aire.



Note: It is recommended that a solvent or alcohol based product be used on hard, nonporous surfaces to remove the protective shield as needed.
Nota: Se recomienda utilizar un producto a base de solvente o alcohol en superficies duras no porosas para quitar el escudo protector según sea necesario.

*CAD addresses *Acinetobacter baumannii* MDR (Multi-drug resistant), *Enterobacter aerogenes*, *Enterobacter aerogenes* MDR (Multi-drug Resistant), *Enterococcus faecalis* VRE (Vancomycin resistant *enterococcus*), *Enterococcus faecium* MDR (Multidrug Resistant), New Delhi metallo-beta-lactamase-1 (NDM-1) producing *Klebsiella pneumoniae* (CRE - Carbapenem resistant *Enterobacteriaceae*), *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus aureus* (Methicillin Resistant) (MRSA).

*Direcciones desinfectantes continuamente activas *Acinetobacter baumannii* MDR (Resistente a multiples farmacos), *Enterobacter aerogenes*, *Enterobacter aerogenes* MDR (Multi-drug Resistant), *Enterococcus faecalis* VRE (Vancomycin resistant *enterococcus*), *Enterococcus faecium* MDR (Multidrug Resistant), New Delhi metallo-beta-lactamase-1 (NDM-1) productora *Klebsiella pneumoniae* (CRE - Carbapenem resistant *Enterobacteriaceae*), *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus aureus* (Methicillin Resistant) (MRSA).